

Benutzerhandbuch

Platinum **CURVE** Treppenlift



- BITTE BEHALTEN SIE DIESE
ANLEITUNG ALS REFERENZ BEI SICH

Inhalt

Kennenlernen Ihres Treppenlifts	4
Regler	5
Netzanschluss	5
Ein/Aus-Schalter	5
Statusanzeige	5
Schlüsselschalter	5
Richtungssteuerung	5
Fußbrett	5
Drehbarer Sitz	6
Sicherheitskanten	6
Sitzgurt	6
Ladepunkte	7
Fernbedienungen	7
Manuelle Dreheinheit	8
Verwendung Ihres Treppenlifts	8
Platz nehmen auf dem Sitz	8
Fahrten nach oben oder unten	8
Aussteigen vom Sitz	8
Fernbedienung	8
Reinigung und Wartung Ihres Treppenlifts	9
Probleme / Fehlerbehebung	10
Systemstatuscodes	10
Netzstrom, Batteriestrom und Stromausfälle	11
Austauschen der Batterie	11
Handbetrieb des Treppenlifts	11
Hilfe anfordern vom Techniker	12
Technische Daten	13
Gewichtslimits	13
Betriebszeiträume / Übermäßige Benutzung	13
Wartung	13
Polster	13
Installations-und Serviceaufzeichnungen	14
Hinweise	15

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Platinum Treppenlift entschieden haben.

Wir haben unsere Platinum Curve Treppenlifts entwickelt, damit Sie auch weiterhin bequem in Ihrem Zuhause leben können.


Um den Treppenlift optimal zu nutzen, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um dieses Handbuch durchzulesen. Zeigen Sie es auch allen weiteren Personen, die den Lift nutzen werden. Wenn Sie Reinigungskräfte oder einen Pfleger beschäftigen, sollten diese das Handbuch ebenfalls durchsehen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, sodass Sie jederzeit darin nachschlagen können und wissen, wen Sie bei technischen Problemen mit Ihrem Treppenlift anrufen können. Denken Sie daran, Ihren Treppenlift eingesteckt und eingeschaltet zu lassen.

Halten Sie den Bereich unter dem Lift und seine unmittelbare Umgebung frei von Hindernissen.



Über den Treppenlift

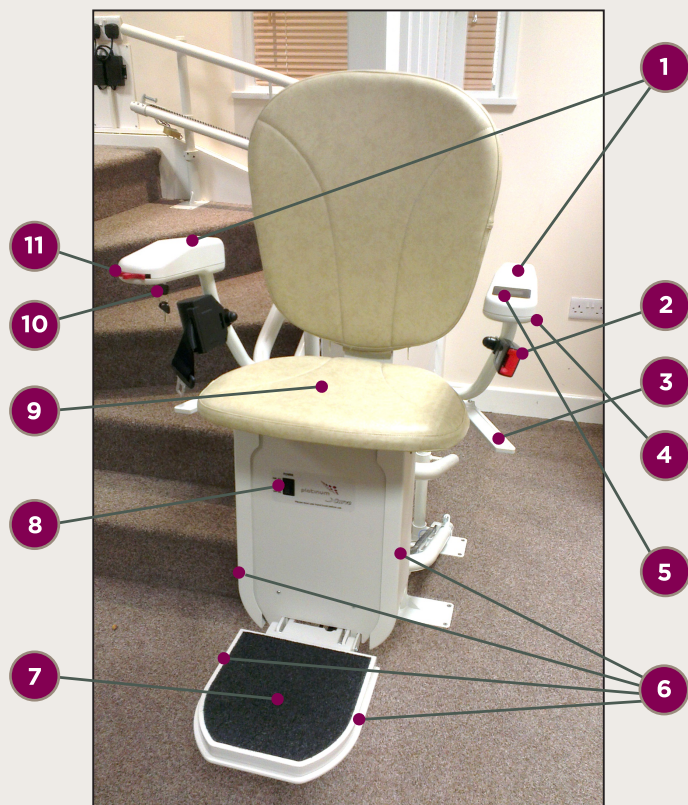

No. Bedeutung

- 1 Armlehnen
(zum Hoch- und Herunterklappen)
- 2 Sitzgurt
- 3 Sitz-Drehhebel
- 4 Bedienung des elektrischen
Fußbretts (sofern angebracht)
- 5 Statusanzeige
- 6 Sicherheitskanten
- 7 Fußbrett
(zum Hoch- und Herunterklappen)


No. Bedeutung

- 8 Ein/Aus-Schalter
- 9 Sitz
(zum Hoch- und Herunterklappen)
- 10 Schlüsselschalter
- 11 Richtungssteuerung
- 12 Netzanschluss
- 13 Ladepunkt
- 14 Fernbedienungen

Diese Nummern werden in der vorliegenden Installationsanleitung
und im Benutzerhandbuch verwendet.

Netzanschluss (12)

Der Treppenlift sollte an der nächstgelegenen Steckdose angeschlossen werden. Diese kann sich oben oder unten an der Treppe befinden. Der Lift muss immer eingesteckt und eingeschaltet sein. Wenn der Strom eingeschaltet ist, leuchtet die grüne Anzeigelampe an dem Netzteil.

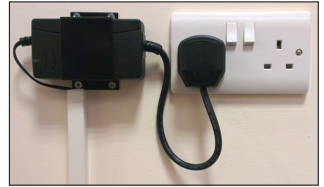

Ein/Aus-Schalter

Der Ein/Aus-Schalter (8) wird zum Ein- und Ausschalten des Treppenlifts verwendet. Er sollte immer eingeschaltet bleiben.



Statusanzeige

Die Diagnoseanzeige (5) zeigt den aktuellen Status an. Wenn beim Betrieb des Lifts Fehler auftreten, werden sie hier angezeigt. Eine Liste der Codes finden Sie im Abschnitt Systemstatuscodes in diesem Handbuch.



Schlüsselschalter

Mit dem Schlüsselschalter (10) wird der Treppenlift verriegelt. Der Schlüsselschalter befindet sich an der Unterseite der Armlehne mit der Richtungssteuerung.



Richtungssteuerung

Die Richtungssteuerung (11) ist rot; sie ist am Ende der einen Armlehne angebracht. Zum Bewegen des Sitzes drücken Sie den Joystick in die gewünschte Richtung und halten ihn gedrückt. Es gibt eine kurze Verzögerung, bevor der Treppenlift startet bzw. die Richtung ändert.



Fußbrett

Das Fußbrett (7) wird manuell hoch- bzw. heruntergeklappt. Elektrische Fußbrett-Option: Ein **Elektrische Fußbrett ist als Option erhältlich** - wenn diese Option angebracht ist, kann das Fußbrett über den Fußbrettsteuerung bedient (4) werden. Diese befindet sich an der Unterseite der Armlehne gegenüber der Armlehne mit der Richtungssteuerung.



Drehbarer Sitz

Drehbarer Sitz

Aus Sicherheitsgründen wird der Sitz (9) in einer von zwei Stellungen verriegelt. In der normalen Fahrstellung ist der Sitz mit dem Rücken parallel zur Schiene verriegelt. Auf diese Weise können Ihre Füße bei der Fahrt nicht in die Treppe eingeklemmt werden. Der Lift fährt nicht an, wenn der Sitz nicht in dieser Stellung verriegelt ist.

Der Sitz kann um ca. 85 Grad gedreht werden, um einen einfachen Zugang zum Lift zu ermöglichen, wenn dieser oben an der Treppe steht. Zum Drehen des Sitzes ziehen Sie einen der Sitz-Drehhebel (3) nach oben, drehen Sie den Sitz zum Treppenabsatz hin, bis er stoppt, und lassen Sie dann den Hebel wieder los, um den Sitz in dieser Position zu verriegeln. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz verriegelt ist, bevor Sie versuchen, sich daraufzusetzen oder davon aufzustehen.

Um den Sitz wieder in seine normale Fahrposition zu bringen, ziehen Sie einen der Sitz-Drehhebel (3) wieder nach oben, drehen Sie den Sitz vom Treppenabsatz weg, bis er stoppt und lassen Sie dann den Hebel wieder los, um den Sitz in dieser Position zu verriegeln. Der Sitz kann nur oben an der Treppe gedreht werden. Wenn Sie versuchen, den Sitz zu drehen, während der Lift sich bewegt, stoppt der Lift.

Elektrische Drehoption: Eine automatische elektrische Dreheinrichtung ist als Option erhältlich. Wenn diese Option angebracht ist, halten Sie die Richtungssteuerung nach oben gedrückt, wenn der Lift das obere Ende der Treppe erreicht. Nach einer kurzen Pause dreht sich die Fahreinheit zum Treppenabsatz hin. Um die Fahreinheit wieder in die normale Fahrposition zu bringen, drücken Sie die Richtungssteuerung nach unten, und der Sitz dreht wieder in die normale Fahrposition, bevor der Lift die Treppe entlang nach unten fährt.



Sicherheitskanten

Das Fußbrett und die Fahreinheit sind mit Sicherheitskanten (6) versehen. Dabei handelt es sich um Druckkanten, die den Lift stoppen, sobald er mit Hindernissen in Kontakt kommt. Wenn der Lift stoppt, weil er auf ein Hindernis gestoßen ist, wird auf der Diagnoseanzeige ein Fehlercode angezeigt. Warten Sie zwei oder drei Sekunden, und fahren Sie dann von dem Hindernis ein Stück zurück.



Sitzgurt


Der Sitzgurt (2) hält Sie sicher auf dem Sitz, während Sie die Treppen hinauf- oder hinunterfahren. Wie bei einem Auto-Sitzgurt verläuft der Gurt von der Halterung bis zu einer Schnalle auf der gegenüberliegenden Seite. Der Sitzgurt muss bei Verwendung des Treppenlifts immer angelegt werden. Öffnen Sie den Sitzgurt nicht, bis der Lift das Ende der Schiene erreicht hat.



Ladepunkte

Ladepunkte

Die Ladepunkte (13) befinden sich am oberen und unteren Ende der Schiene. Wenn der Lift nicht verwendet wird, MUSS er an einem Ladepunkt geparkt werden. Der Treppenlift gibt einen hörbaren Piepston aus, wenn er nicht an einem Ladepunkt geparkt wird.

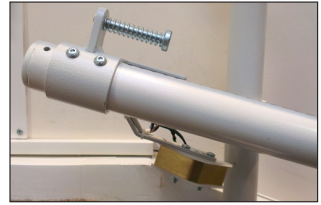

Fernbedienungen

Die Fernbedienungen (14) funktionieren auf die gleiche Weise wie die Armlehnen-Regler. Der Standardlift ist mit zwei Fernbedienungen ausgestattet. Diese Fernbedienungen haben drei Tasten. Aufwärts, abwärts und parken.



Verwendung Ihres Treppenlifts

Verwendung Ihres Treppenlifts

Bevor Sie den Treppenlift verwenden, lesen Sie bitte alle Anleitungen sorgfältig durch.

Ihr Treppenlift wurde für den Transport von Personen in sitzender Stellung konzipiert. Lassen Sie Kinder nicht auf dem Lift oder in seiner direkten Umgebung spielen.

Der Sitz des Treppenlifts muss beim Ein- und Aussteigen aus dem Lift mit dem Schlüsselschalter isoliert werden. Wenn Sie nicht sicher in den Lift ein- oder daraus aussteigen können, lassen Sie sich von einer kompetenten Person dabei helfen.

Einsteigen in den Sitz

1. Klappen Sie das Fußbrett von Hand nach unten (7). Wenn ein elektrisches Fußbrett angebracht ist, drücken Sie den Schalter für das elektrische Fußbrett und halten Sie ihn gedrückt, bis das Fußbrett ganz unten liegt. Der Schalter befindet sich unter der Armlehne gegenüber der Lehne mit dem Richtungs-Joystick.
2. Klappen Sie die Sitzfläche (9) herunter und vergewissern Sie sich, dass der Sitz in die richtige Position gedreht wurde, sodass Sie sicher darauf sitzen können. Wenn der Sitz gedreht werden muss, ziehen Sie einen der Sitz-Drehhebel (3) ganz nach oben und drehen Sie den Sitz vollständig um. Wenn der Sitz stoppt, lassen Sie die Sitzhebel los und vergewissern Sie sich, dass der Sitz in der richtigen Position verriegelt ist.
3. Klappen Sie die Armlehnen nach unten (1).
4. Setzen Sie sich auf den Sitz, legen Sie den Sitzgurt (2) um Ihre Hüfte und schnallen Sie sich fest.
5. Wenn nötig, drehen Sie den Sitz wieder in die richtige Fahrposition und stellen Sie Ihre Füße auf das Fußbrett (7).

Fahrten nach oben oder unten:

Halten Sie Ihre Füße auf dem Fußbrett (7) und Ihre Arme auf den Armlehnen.

Drücken Sie die Richtungssteuerung (11) in die gewünschte Richtung. Nach einer kurzen Verzögerung fährt der Treppenlift langsam an. Der Treppenlift stellt seine Geschwindigkeit entlang der Schiene automatisch ein für eine sanfte und bequeme Fahrt. Halten Sie den Joystick in die gewünschte Richtung gedrückt, bis der Treppenlift vollständig zum Stillstand gekommen ist. Wenn die elektrische Dreheinrichtung angebracht ist, halten Sie den Joystick gedrückt, bis der Sitz vollständig in die richtige Position gedreht wurde. Wenn der Treppenlift zum Stillstand gekommen ist, lassen Sie den Joystick los und steigen Sie aus dem Lift aus.

Wenn Sie den Lift während der Fahrt anhalten oder die Richtung wechseln wollen, lassen Sie den Joystick los, warten Sie einige Sekunden und drücken Sie dann den Joystick in die gewünschte Richtung.

Es gibt eine kurze Verzögerung, bevor sich Treppenlift in Bewegung setzt.

Aussteigen vom Sitz

1. Der Sitz muss in einer Position stehen, aus der Sie sicher aussteigen können. Bitte beachten Sie, dass der Sitz dabei eventuell gedreht wird. Wenn der Sitz gedreht werden muss, ziehen Sie einen der Sitz-Drehhebel (3) ganz nach oben und drehen Sie den Sitz (9) ganz in die richtige Position, um sicher aussteigen zu können. Wenn der Sitz stoppt, lassen Sie die Sitzhebel los, um den Sitz in der richtigen Position zu verriegeln.
2. Lösen Sie den Sitzgurt (2) von Ihrer Hüfte und steigen Sie aus dem Treppenlift-Sitz aus.
3. Klappen Sie die Armlehnen (1) und den Sitz (9) nach oben.
4. Klappen Sie das Fußbrett (7) nach oben. Wenn ein elektrisches Fußbrett angebracht ist, drücken Sie den Schalter für das elektrische Fußbrett und halten Sie ihn gedrückt, bis das Fußbrett ganz oben liegt. Der Schalter befindet sich unter der Armlehne gegenüber der Lehne mit dem Richtungs-Joystick.
5. Wenn der Treppenlift ohne einen Passagier bewegt werden muss, muss der Sitz zunächst wieder in die richtige Fahrposition gebracht werden.

Fernbedienung

Wenn der Treppenlift ohne einen Passagier bewegt werden soll, oder als Hilfe für einen sitzenden Passagier drücken Sie die gewünschte Richtungstaste an der Fernbedienung (14) und halten Sie sie gedrückt.

Reinigung und Wartung Ihres Treppenlifts

Für einen dauerhaft sicheren und zuverlässigen Betrieb muss eine regelmäßige Inspektion und Wartung Ihres Standard-Treppenlifts durchgeführt werden.

Ihr Treppenlift-Servicezentrum erläutert Ihnen gern die Service- und Wartungsvereinbarungen zu Ihrem Treppenlift.

Vor der Reinigung des Treppenlifts müssen Sie ihn mit dem Schlüsselschalter (10) ausschalten.

Das obere und untere Rohr der Treppenlift-Schiene muss sauber gehalten werden, um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb des Treppenlifts sicherzustellen. Diese Rohre können mit Seifenwasser oder mit einem milden, nicht scheuernden Haushaltsreiniger gereinigt werden.

Zur Reinigung der Kunststoff- und Metallteile sowie der lackierten Metallteile des Treppenlifts kann ein wenig milder Küchen-Oberflächenreiniger verwendet werden.

Wenn Sie ein Spray verwenden, tragen Sie eine geringe Menge des Sprays auf ein weiches Tuch auf und reiben Sie mit diesem Tuch die Oberfläche vorsichtig ab.

Die Polster sind gegen die meisten Flecken unempfindlich; die meisten Flecken lassen sich sehr einfach entfernen. Reinigen Sie die Polster regelmäßig mit einem feuchten, seifigen Tuch oder Schwamm und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen feuchten Tuch ab. So behält die Polsterung lange Zeit ihr frisches Aussehen.

Für einen dauerhaft sicheren und zuverlässigen Betrieb muss eine regelmäßige Inspektion und Wartung Ihres Standard-Treppenlifts durchgeführt werden. Der Lift sollte alle 12 Monate inspiziert und gewartet werden.

Ihr Treppenlift-Servicezentrum erläutert Ihnen gern die Service- und Wartungsvereinbarungen zu Ihrem Treppenlift.



Wichtig

Lösungsmittelhaltige Reiniger, Bleichmittel, Scheuermittel, synthetische Reinigungsmittel, Wachs- und Silikonpolituren oder Aerosolsprays dürfen an keinen Teilen des Treppenlifts angewendet werden. Versuchen Sie nicht, das Innere des Motorgehäuses, den Sitz oder die Schienen zu reinigen. Wenn eine spezielle Reinigung erforderlich ist, wenden Sie sich an Ihr Servicezentrum.

Probleme / Fehlerbehebung

Bei richtiger Verwendung ermöglicht Ihr Treppenlift lange Zeit einen reibungslosen Betrieb. Wenn Probleme auftreten, gehen Sie anhand der nachfolgenden Checkliste vor, bevor Sie einen Besuch eines Servicetechnikers anfordern. Der Techniker wird seinen Besuch in Rechnung stellen, wenn kein technisches Problem mit dem Lift vorliegt.

Systemstatuscodes

Diese Codes werden auf der Diagnoseanzeige (5) in der Armlehne angezeigt.

Kode	Bedeutung
Keine Anzeige	Kein Strom <i>Überprüfen Sie, ob sich der Ein/Aus-Schalter in Position 'I' befindet</i>
Batterie isoliert	Der Treppenlift ist AUSgeschaltet <i>Überprüfen Sie, ob sich der Ein/Aus-Schalter in Position 'I' befindet</i>
Platinum	OK <i>Der Treppenlift ist mit der Ladestation verbunden; es ist alles in Ordnung. Der Lift sollte normal funktionieren.</i>
Not Stop	Fehler bei Begrenzungsschaltung <i>1. Überprüfen Sie, ob der Schlüssel eingesteckt und eingeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Sitz in die richtige Position gedreht wurde.</i>
Batterie Schwach	Die Batterien müssen geladen werden <i>1. Überprüfen Sie, ob der Lift korrekt an einem der Ladepunkte geparkt wurde. 2. Überprüfen Sie, ob das Netzteil an der Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.</i>
Lädt nicht auf	Der Lift wird nicht geladen. <i>Die Treppenlift-Batterien werden nicht aufgeladen (der Treppenlift funktioniert eventuell trotzdem). Laden Sie sie wie folgt: 1. Fahren Sie den Treppenlift an einen Ladepunkt 2. Überprüfen Sie, ob das Netzteil an der Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.</i>
End Stop	Endstop aktiviert (untere Schienen-Metallabdeckung links und rechts) <i>Vergewissern Sie sich, dass an der Schiene und der Treppe keine Hindernisse vorliegen.</i>
Direkt Stop	Der Lift wurde durch die Sicherheitskante in Fahrtrichtung (Bodenplatte, obere Schiene, seitliche Abdeckung) gestoppt. <i>Vergewissern Sie sich, dass an der Schiene und der Treppe keine Hindernisse vorliegen.</i>
Fahrt nach rechts	Fahrtrichtung des Lifts. <i>Rechts.</i>
Fahrt nach links	Fahrtrichtung des Lifts. <i>Nach links.</i>
Sitz Gedreht	Sitz in gedrehter Position (nur elektrischer Drehsitz) <i>Der Lift kann nicht fahren, bis der elektrische Drehsitz in die Fahrposition zurückkehrt.</i>
Position Verloren	Der Lift hat seine vorgegebene Position verloren <i>Fahren Sie den Lift an das untere Ende der Schiene, um die vorgegebene Position zurücksetzen.</i>
Overload	Motor und Motorantrieb laufen zu heiß; Lift überlastet oder zu starke Nutzung <i>Schalten Sie den Lift aus und lassen Sie den Motor abkühlen.</i>
Rufesende-Konflikt	Es wurden mehrere sich widersprechende Aufrufe empfangen <i>Richtungsumschaltung oder Fernbedienungstaste verklemmt.</i>
Joystick Loslassen	Widersprüchliche Aufrufe empfangen <i>Der Benutzer muss den Joystick loslassen und den Aufruf erneut eingeben.</i>
Bremsen-Fehler	Motorbremse nicht betriebsbereit <i>Schalten Sie den Lift mit dem Ein/Aus-Schalter aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein.</i>
Relais-Fehler	Das Strom-Relais hat nicht geschlossen. <i>Schalten Sie den Lift mit dem Ein/Aus-Schalter aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein.</i>

Netzstrom, Batteriestrom und Stromausfälle

Über den Netzstrom wird ein Satz großer interner Batterien mit Strom versorgt. Diese Batterien versorgen den Motor mit Strom, der den Lift antreibt und die Treppe hinauf- und hinabbefördert.

Wenn der Netzstrom ausfällt, können Sie den Treppenlift kurzzeitig weiter verwenden, solange die Batterien genügend Leistung gespeichert haben, um den Lift ein paar Mal nach oben oder unten zu fahren.

Wenn der Batteriestrom zu schwach wird (z. B. nach einer Unterbrechung der Stromversorgung) erscheint der Code **'Low Battery' (Batterie schwach)** in der Statusanzeige. An dieser Stelle sollten Sie die Treppenlift-Batterien unbedingt aufladen.

Austauschen der Batterie

Die großen internen Batterien müssen regelmäßig von einem Servicetechniker ausgetauscht werden. Sie werden im Rahmen einer Wartung durch den Techniker geprüft und bei Bedarf ausgetauscht.

Sie müssen die Batterien in der Fernbedienung (15) regelmäßig austauschen. So tauschen Sie die Batterien in der Fernbedienung aus:

- Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und nehmen Sie die alte Batterie heraus.
- Tauschen Sie sie gegen 2 neue AAA-Batterien aus. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.


Handbetrieb des Treppenlifts

Der Treppenlift sollte nur von einer entsprechend geschulten Person oder unter ihrer Aufsicht von Hand betrieben werden. Durch den Handbetrieb in Abwärtsrichtung kann der Treppenlift unter Umständen schwer beschädigt werden; derartige Schäden sind nicht durch die Garantie bzw. Gewährleistung abgedeckt.

Schalten Sie den Treppenlift aus. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung von dem Sitzrahmen und der Sitzfläche.



Drehen Sie den Sitz mithilfe der manuellen Drehhebel ganz nach außen.

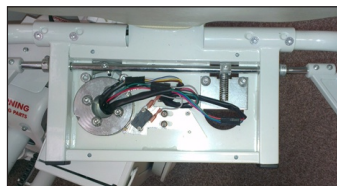

Stecken Sie die Handkurbel durch die Öffnung über dem Drehknopf auf der Motorwelle auf, und drehen Sie sie.



Probleme / Fehlerbehebung

Befreien eines “gefangenen” Benutzers

Wenn ein Benutzer durch einen technischen Fehler im Treppenlift “gefangen” sein sollte, sollte ihm wie folgt aus dem Sitz geholfen werden:

- Einen der manuellen Drehhebel nach oben ziehen und den Sitz zur Treppe hin drehen, bis er in der gedrehten Position einrastet.
- Den Sitzgurt des Benutzers öffnen
- Anschließend kann dem Benutzer aus dem Sitz heraus- und die Treppe hinaufgeholfen werden.
- Den manuellen Drehhebel nach oben ziehen und den Sitz wieder in seine ursprüngliche Stellung bringen

Stehen Sie niemals vom Sitz auf, bevor dieser zur Treppe hin gedreht wurde und in dieser Stellung eingerastet ist. Sitzen Sie immer aufrecht.

Hilfe anfordern von einem Techniker

Wenn Sie das Problem noch immer nicht lösen können, wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker (normalerweise bei der Firma, bei der Sie den Lift gekauft haben). Halten Sie eine Liste der aufgetretenen Statuscodes bereit.

Alternativ nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf



Gewichtslimits

Der Standard-Treppenlift wurde für den Transport einer einzigen Person mit einem Maximalgewicht von 120 kg konzipiert. Für den Schwerlast-Treppenlift gilt ein maximales Gewicht von 160 kg.

Betriebszeiträume / Übermäßige Benutzung

Ihr Treppenlift wurde für einen kontinuierlichen Betrieb von maximal 15 Minuten innerhalb eines Zeitraums von 3 Stunden konzipiert. Wenn Sie den Treppenlift zu häufig ohne Pause verwenden, kühlt der Motor zwischen den Fahrten nicht ab und kann dadurch beschädigt werden.

Wartung

Für einen dauerhaft sicheren und zuverlässigen Betrieb muss eine regelmäßige Inspektion und Wartung Ihres Standard-Treppenlifts durchgeführt werden. Der Standard-Treppenlift (120 kg) muss alle zwölf Monate gewartet werden. Der Schwerlast-Treppenlift (160 kg) muss alle sechs Monate gewartet werden.

Ihr Treppenlift-Servicezentrum erläutert Ihnen gern die Service- und Wartungsvereinbarungen zu Ihrem Treppenlift.



Achtung

Veränderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Garantie und zu Schäden am System führen.

Ihr Treppenlift sollte von einem von Platinum zugelassenen Servicetechniker inspiziert und gewartet werden.

Polster

Fahrlässigkeit mit Streichhölzern, Zigaretten etc. kann einen Brand verursachen. Das in Ihrem Treppenlift verwendete Polstermaterial wurde auf Konformität mit der Sicherheitsvorschrift BS5852 getestet.



Achtung

Im Fall eines Brandes dürfen Sie den Treppenlift NICHT verwenden.

Installations-und Serviceaufzeichnungen

Datum	Installiert von	Unterschrift	1. Service fällig am

Datum	Installateur	Unterschrift	Nächster Service fällig am



Platinum Stairlifts Tel. +44 (0)1535 631177 Fax. +44 (0)1535 631188

Unit 10, The Crossings, Crosshills Business Park, Crosshills, Keighley,
West Yorkshire, United Kingdom, BD20 7BW

enquiries@platinumstairlifts.com www.platinumstairlifts.com